

添付文書

2025 年 2 月作成(初版)

医療機器届出番号：13B2X10341000002

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 骨盤底筋訓練器具 46624001

インナーマッサージスティック

【警告】

妊娠中は医師の指導に従って慎重に使用すること。

【禁忌・禁止】

本品を長時間膣内に留置しないこと

本品の分解や修理、改造をしないこと

直接、高温の炎や熱風にさらしたり、高温化での使用や放置、保管をしないこと

乳幼児やペットの手の届く所に保管しないこと

【形状・構造及び原理等】

<構成>

本品は、経膣的に骨盤底筋に圧力を加え、筋肉をほぐす目的で用いる手法において、膣に挿入する剛性の棒状器具である。

<形状・構造>



<原理>

使用者が本品を手を持ち、膣内に挿入し、使用者自らの力加減で膣壁越しに骨盤底筋を圧迫するように刺激する。

<原材料>

シリコンゴム、アルミニウム合金

【使用目的又は効果】

経膣的に骨盤底筋をほぐすことができる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ①膣への挿入は2-4cmを目安として、ゆっくり挿入すること。
- ②痛みを感じるときは無理に挿入せず使用を中止すること。使用中止後も痛みが続く場合は医師の診察を受けること。
- ③万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ④複数人での使いまわしはしないこと。

【保管方法及び有効期限等】

＜保管方法＞

- ①直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保管すること。
- ②本品は指示された方法で保管すること。[不適切な保管は製品の劣化や破損の原因となる。]

＜有効期間＞

なし

＜廃棄方法＞

使用後は各自治体のルールに従って捨てること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 TENGA、住所：〒104-0053

東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海トリトンスクエア Z 棟 11 階

TEL：0120-232-567(土日祝を除く 10:00-19:00)